

④ Gebrauchsanweisung



boso
bosorelax 8000

- 1 Massagegerät **bosorelax 8000**
- 1 Ladegerät
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Garantie-Urkunde

Wichtige Hinweise – vor Benutzung des Gerätes unbedingt lesen:

- **Hinweise sorgfältig lesen.**
- Sollten Sie gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung dieses Gerätes.
- Personen mit Herzschrittmachern sollten Ihren Arzt vor der Verwendung befragen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt liegen, besonders wenn Kinder anwesend sind.
- Bedecken Sie das Gerät nie, wenn es in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen. Längere Benutzung kann zur Überhitzung des Gerätes und zur Verkürzung der Lebensdauer führen.
- Sollte sich das Gerät dennoch erhitzt haben, schalten Sie das Gerät umgehend aus und lassen es abkühlen bevor Sie die Anwendung fortsetzen.
- Benutzen Sie das Gerät nie direkt auf angeschwollenen oder gereizten Hautpartien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ersatz für ärztliche Behandlung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unmittelbar vor dem zu Bett gehen. Die Massage hat einen anregenden Effekt und kann das Einschlafen verzögern.
- Dieses Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Benutzer unter Einflüssen steht, welche die Körperkontrolle in irgendeiner Weise beeinträchtigt (z. B. Medikamente).
- Dieses Gerät darf von Kindern nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.

Wichtige Anwendungshinweise

- Vor der ersten Benutzung Ihres **bosorelax 8000**, sollte es mindestens 15 Stunden lang aufgeladen werden. Dies ist die minimale Zeit, um die Batterien erstmalig vollständig aufzuladen.
- Die nachfolgenden Ladezeiten sind kürzer, abhängig davon, wie lange das **bosorelax 8000** benutzt wurde.
- Vollgeladen reicht die Akkukapazität für circa 40 Minuten im Betrieb auf Stufe „LO“ (auf Stufe „HI“ entsprechend kürzer).
- Vor dem Laden stellen Sie den Schiebeschalter auf die Position „OFF“.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit der Netzsteckdose und stecken Sie den Anschlussstecker in die Ladebuchse an der Unterseite des **bosorelax 8000** Handgriffs. (Vgl. Abbildung auf Seite 7)
- Benutzen Sie zur Ladung ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Wurde das **bosorelax 8000** ordnungsgemäß mit dem

Stromnetz verbunden, leuchtet während des Ladevorgangs die rote Kontrollleuchte.

- Ist das Gerät vollständig geladen (nach ca. 8 Stunden), ist es vom Ladegerät zu trennen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Um das **bosorelax 8000** einzuschalten, den Schiebeschalter an der Oberseite des Handgriffs auf die gewünschte Stufe schieben.
Stufe LO = niedrige Massage-Intensität
Stufe HI = starke Massage-Intensität
- Um das Gerät auszuschalten, wählen Sie die Position „OFF“.
- Bewegen Sie das **bosorelax 8000** ohne Druck zu dem Bereich, den Sie massieren möchten.
- Massieren Sie immer zum Herzen hin, unabhängig davon welches Körperteil behandelt wird.
- Beginnen Sie immer mit dem Punkt, der am weitesten vom Herz entfernt liegt.

- Die Massage sollte mit einer Bewegung in Richtung des Herzens enden.
- Bewegen Sie das **bosorelax 8000** langsam, entweder in kreisender oder in einer linearen Bewegung.
- Behandeln Sie jeden Körperbereich für maximal 3 Minuten und wechseln Sie daraufhin auf einen anderen Bereich.

Vorsicht:

Verwenden Sie dieses Gerät nie im Bereich der Augen oder anderen sehr empfindlichen Körperbereichen.

- Greifen Sie nicht während des Betriebs an den Massagekopf.
- Wenn die Massage abgeschlossen ist, schalten Sie das Gerät aus und bringen den (evtl. ausgezogenen) Massagekopf in seine ursprüngliche Position zurück.

- Nach jedem Ladevorgang stellen Sie sicher, dass das Ladegerät vom **bosorelax 8000** und vom Stromnetz getrennt wurde.
- Laden Sie das Gerät neu, sobald die Massage-Intensität nachlässt.
- Entladen Sie das Gerät von Zeit zu Zeit vollständig.

Verwendung des ausziehbaren Teils

Das **bosorelax 8000** besitzt einen ausziehbaren Körper.


Um das Gerät zu verlängern, betätigen Sie die Entriegelungs-Taste, die sich an der Unterseite des Handgriffs befindet und ziehen Sie das Gerät auseinander. Das Gerät kann auf 3 Längen eingestellt werden. Beim Erreichen der gewünschten Länge lassen Sie die Entriegelungstaste los, das Gerät wird in dieser Länge fixiert.

Um das Gerät in seine ursprüngliche Länge zurückzustellen, betätigen Sie die Entriegelungstaste erneut und schieben das Gerät bis zum Anschlag zusammen.

Reinigung und Pflege

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Ladegerät getrennt ist.

Zum Reinigen des Gerätes verwenden Sie bitte nur ein weiches, trockenes Tuch. Keinesfalls Flüssigkeit mit dem Gerät in Verbindung bringen.

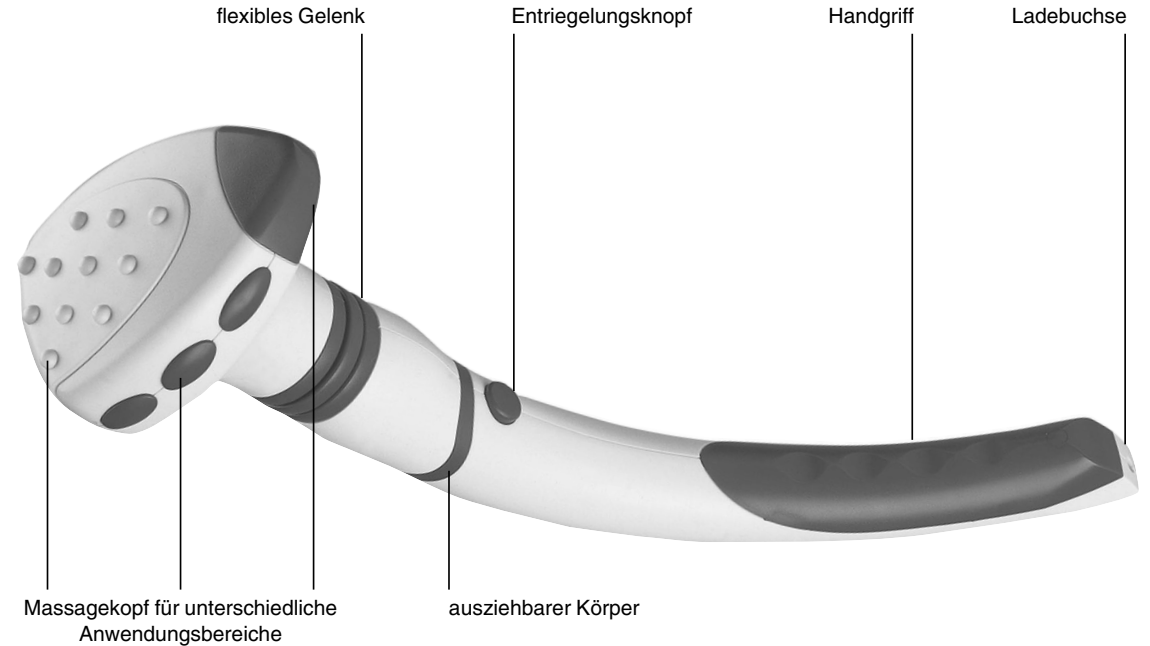

Lagern Sie das Gerät nur vollständig abgekühlt an einem sauberen, trockenen Ort.

Trennen Sie das Gerät während der Lagerung vom Ladegerät.

Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Garantie-Urkunde.

Ein Garantieanspruch kann nur anerkannt werden, wenn die vom Händler ausgefüllte und abgestempelte Garantie-Urkunde zusammen mit dem Gerät eingeschickt wird.

Für Garantie- und Reparaturarbeiten senden Sie das Gerät bitte sorgfältig verpackt und ausreichend frankiert an Ihren autorisierten Fachhändler oder direkt an:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co.
Fabrik mediz. Apparate
Bahnhofstraße 64
D-72417 Jungingen

Stromversorgung:

Ni-Cd Battery Pack, 2,4 V, 1300 mAh

Ladegerät:

AC 230 V, 50 Hz

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. · Fabrik mediz. Apparate
Bahnhofstraße 64 · 72417 Jungingen · Germany
Telephone: +49 (0) 74 77 92 75-0 · Fax: +49 (0) 74 77 10 21