

Gebrauchsanweisung

TAiMA



DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

Allgemein

Der TAiMA Rollator ist stabil, leicht und nimmt - gefaltet - nur wenig Platz in Anspruch. Er unterstützt bei allen Unternehmungen und Wegen und bietet im richtigen Moment einen Platz zum Sitzen und Ruhen. Bitte lesen sie sich zunächst diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und machen sie sich mit allen Funktionen des Rollators vertraut.

Für den hier beschriebenen Rollator ist die Konformität gemäß EG - Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Besitzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführungen behalten wir uns vor.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren sie bei uns.

Nachdruck, Übersetzung und vervielfältigung in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Indikation und Verwendungszweck

Der TAiMA Rollator dient bewegungseingeschränkten Personen mit maximal 150 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkte Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

Der Rollator darf nur auf festem und ebenen Untergrund verwendet werden. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere als Aufstiegshilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich.

Reinigung/Wartung/Wiedereinsatz

Reinigung

Eine Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Verwenden Sie dafür eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.

Wartung

Der TAiMA ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen, dann bringen Sie den Rollator zur Instandsetzung zu Ihrem Fachhändler.

Wiedereinsatz

Denken sie bitte daran bei der Weitergabedes Rollators dem neuen Nutzer sämtliche, für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen zu übergeben. Der Rollator muss durch den Fachhandel - wie oben angegeben - überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

Sicherheitshinweise

Hängen Sie keine Taschen an die Griffe – Kippgefahr!


Benutzen Sie auf abschüssigen Wegen die Betriebsbremse (Ziehen Sie die Bremshebel nach oben).

Benutzen Sie den Rollator nur auf festem und ebenen Untergrund.

Bei zu starkem Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen.

Beim Zusammen- / Auseinanderklappen des Rollators können Kleidungs- und Körperteile eingeklemmt werden.

Bitte beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung.

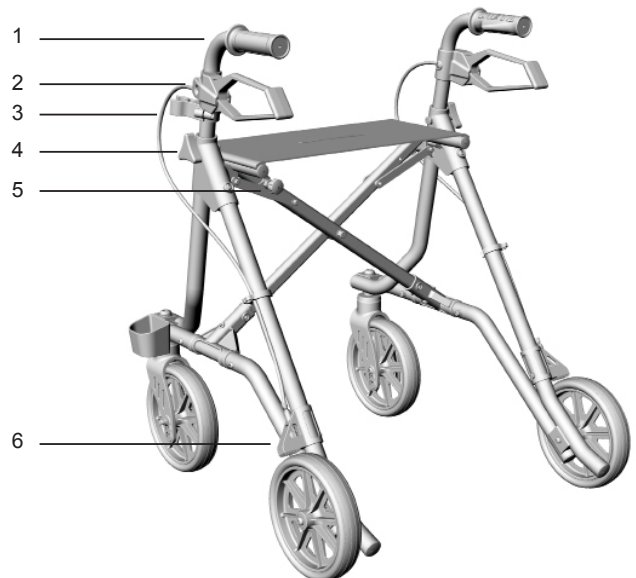


1. Ergonomische Handgriffe
2. Bremshebel
3. Stockhalter
4. Sternschraube für Höhenverstellung
5. Verriegelungsknopf /Faltsperr
6. Bremse

1. Rollator aufstellen/entfalten

Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrtrichtung und betätigen Sie die Feststellbremse (Bremshebel nach unten).


Drücken Sie mit beiden Händen die Seitenrohre der Sitzfläche links und rechts nach unten bis der Klappmechanismus einrastet.

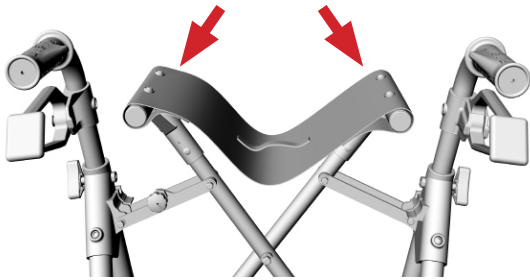

2. Bremsen

Betriebsbremse (beim Schieben): Ziehen Sie den Bremshebel nach oben.


Feststellbremse (beim Parken): Drücken Sie den Bremshebel nach unten.

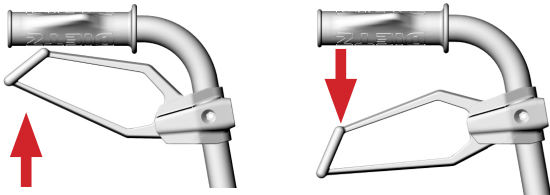

3. Bremsen einstellen


Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel wie auch die Bowdenzüge kein Spiel aufweisen und die Räder sich, bei gelöster Bremse, ohne Schleifgeräusche drehen lassen.

Die Bremswirkung kann an der Stellschraube des Bowdenzugs an den Bremsklötzen der Hinterräder eingestellt werden.

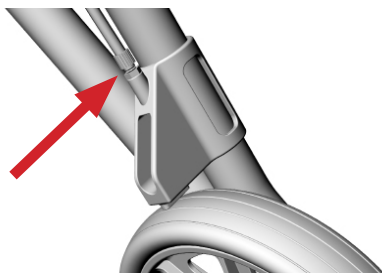

4. Steighilfe

Durch Druck mit der Fußspitze auf den verlängerten Rahmen wird das Anheben der Lenkräder erleichtert.

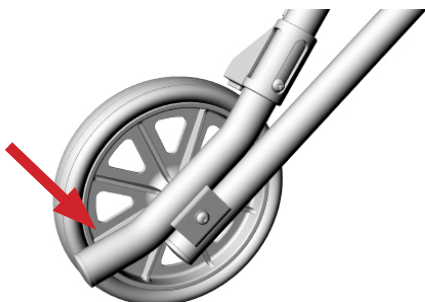


5. Griffhöhe einstellen

Lösen Sie die Verschraubung und nehmen Sie die Sternschraube ganz heraus.

Positionieren Sie die Schiebegriffe in der korrekten Höhe.

Setzen sie anschließend die Sternschraube wieder ein und ziehen sie fest.

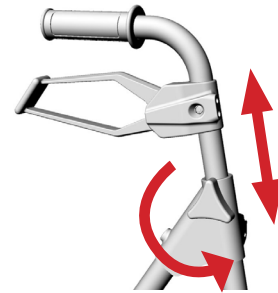


6. Rollator falten

Lösen sie die Faltsicherung unter dem Sitz.

Ziehen sie am Zugband der Sitzfläche nach oben.

Der Rollator faltet sich nun selbstständig zusammen.

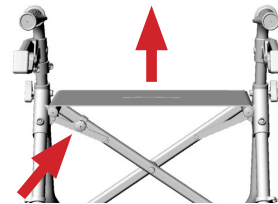

Technische Daten

	TAiMA_S	TAiMA_M
Höhe	76 - 86 cm	79 - 95 cm
Höhe zusammengeklappt	76 cm	81 cm
Sitzhöhe	51 cm	59 cm
Länge	63 cm	67 cm
Breite	58 cm	63 cm
Breite zusammengeklappt	22 cm	22 cm
Max. Nutzergewicht	150 kg	150 kg
Leergewicht	6.5 kg	6.5 kg
Reifengröße	20 x 3.5 cm	20 x 3.5 cm
Griffhöhe verstellbar	5 x 2.5 cm	5 x 4 cm
Max Zuladung Tasche	5 kg	5 kg

Lieferumfang

- Rollator TAiMA
- Stockhalter L/R montierbar
- Netztasche
- Gebrauchsanweisung

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre auf den Aluminiumrahmen, für alle restlichen Teile 24 Monate.

Die Gewährleistung gilt nicht für Verschleißteile sowie bei unsachgemäßer Benutzung.